

## BOSTON™ SIMPLUS ÇOK İŞLEVLİ SOLÜSYON

Bu Kullanma Talimatı önemli bilgiler içermektedir. Lütfen dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

**Floro silikon akrilat ve silikon akrilat gaz geçirgen sert kontakt lensler için özel olarak formüle edilmiştir.**

**Ürün Açıklaması ve Kullanım Endikasyonları:** Boston™ SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon, gaz geçirgen sert lenslerle kullanılmak üzere geliştirilmiş yenilikçi bir solüsyondur ve temizlik, dezenfeksiyon ve bakım ihtiyaçlarınızı tek şişeye gidermenizi sağlar. Floro silikon akrilat ve silikon akrilat gaz geçirgen kontakt lenslerle kullanımı onaylanmıştır. Boston™ SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon, protein ve lipidleri lens yüzeyinden arındırırken aynı zamanda lensler üzerinde inatçı birikintiler oluşmasını engellemeye de yardımcı olur. Bu solüsyon ayrıca, lensler üzerindeki gevşemiş yüzey birikintilerinin temizlenmesi amacıyla lenslerin durulanması için de kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Çok polimerli tampon sistemi lensi nemlendirerek takıldığında tamponlama ve eşit olarak dağılmış nemlilik sağlar. Patentli bir nemlendirici sayesinde lensin nemli kalabilme özelliği korunur. Bu formül, gözlerinizde rahatlatıcı bir etki oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca zararlı organizmaları etkili şekilde yok ettiği kanıtlanmış olan bir koruma sistemi de içerir. Etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan bu solüsyonun takılan lensle birlikte gözle temas etmesi herhangi soruna neden olmaz.

**İÇİNDEKİLER:** Poloksamin, hidroksi alkil fosfonat, borik asit, sodyum borat, sodyum klorür, hidroksipropil metil selüloz, glukam ve koruyucu olarak klorheksidin glukonat (%0,003), poliaminopropil biguanid (%0,0005) içeren steril, su ihtiva eden, tamponlanmış bir solüsyondur.

### TALİMATLAR:

Şişede bulunan kapak güvenlik bandını çıkartınız. Kapak güvenlik bandı açılmışsa veya mevcut değilse solüsyonu kullanmayınız. Dezenfeksiyonun düzgün bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda listelenen tüm adımlar uygulanmalıdır:

1. Ellerinizi yumuşak bir sabunla yıkayınız. (Dikkat: Sıvı sabunlar yağ bazlı süspansiyon ajanları içerebilir.)
2. Lensleri boş lens kutusuna yerleştiriniz ve kutuyu yeni Boston™ SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon ile doldurunuz. Lensleri takmadan önce en az dört (4) saat veya gece boyunca bu solüsyonda bekletiniz.
3. Lensleri beklettikten sonra lens kutusundan çıkartınız ve avcunuza iki (2) ila dört (4) damla Boston™ SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon dökerek lenslerin her iki tarafını da yirmi (20) saniye boyunca dikkatlice ovunuz. Ayrı bir günlük temizleyicinin kullanılması gerekmez.
4. Gevşemiş yüzey birikintilerini temizlemek için Boston™ SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon'u sürekli bir şekilde dökerek lensleri beş (5) saniye süreyle durulayınız ve sonra lenslerinizi takınız.
5. Her kullanımdan sonra lens kutusunun içini kaynamış sıcak suyla iyice temizleyiniz ve kutuyu kurumaya bırakınız.

**Önlem:** Kontaminasyonu önlemek amacıyla, şişenin ucunun herhangi bir cisimle temas etmemesine özen gösteriniz. Kullanmadığınız zamanlarda şişeyi tamamen kapalı şekilde muhafaza ediniz.

## UYARILAR VE ÖNLEMLER:

### KONTAKT LENSLE VE LENS BAKIM ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR GÖZLERDE CİDDİ

**YARALANMALAR NEDEN OLABİLİR.** Lenslerinizi ve lens kutusu da dahil olmak üzere tüm lens bakım ürünlerinizi doğru şekilde kullanabilmek için göz sağlığı uzmanınızın yönlendirmelerine uymanız ve kullanma talimatlarını istisnasız bir şekilde uygulamanız çok önemlidir. Enfeksiyon ve kornea ülserleri de dahil olmak üzere göz sorunları hızla gelişebilir ve görüş kaybına (körlük dahil) neden olabilir.

- Bu ürünün içeriğindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.
- Yumuşak (hidrofilik) kontakt lenslerle kullanıma uygun değildir.
- Göz sağlığı uzmanınız tarafından önerilen lens bakım prosedürlerine uymanız gereklidir. Bu prosedürlere uyulmaması ciddi göz enfeksiyonlarının gelişmesine neden olabilir.
- Solüsyonu kontamine edebileceği veya gözünüze zarar verebileceği için şişenin ucunu herhangi bir yüzeye ya da gözünüze dokundurmayınız.
- Lenslerinizi tutmadan önce daima ellerinizi yıkayınız.
- Aynı solüsyonu asla tekrar kullanmayınız. Lensleri temizlemek ve dezenfekte etmek için her zaman yeni solüsyon kullanınız.
- Kontaminasyonu veya buharlaşmayı önlemek için kullanmadığınız zamanlarda şişenin kapağını kapalı tutunuz.
- Tıbbi gözetim altında olmadıkça, bu solüsyonla birlikte herhangi bir göz ilacı kullanmayınız.
- Şişeyi açtıktan 3 ay sonra şişede kalan solüsyonu atınız.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.
- **ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ.**
- Lens kutuları ciddi bir mikrobiyal kontaminasyon ve oküler tahriş kaynağı olabilir. Lens kutuları her gün bir yüzey aktif kontakt lens temizleyici ile temizlenmeli, kaynamış sıcak su ile durulanmalı ve kapakları açık olarak kurumaya bırakılmalıdır. Lens kutuları sık sık değiştirilmelidir.

**ÖNEMLİ:** Gözünüzde tahriş veya aşırı sulanma oluşursa, sürekli bu durum devam ederse veya giderek artarsa ya da görüşünüz bozulursa, ürünü kullanmayı bırakınız ve derhal göz sağlığı uzmanınıza danışınız.

### Advers Reaksiyonlar (Sorunlar ve Yapılması Gerekenler)

Aşağıdaki sorunların ortaya çıkabileceğinin bilincinde olmalısınız:

- Gözlerde batma, yanma, kaşıntı (tahriş) veya farklı bir ağrı
- Lensin göze ilk takıldığı zamana göre konforda azalma
- Gözün içinde bir şey varmış gibi anormal bir his (ör. yabancı madde, çizilmiş alan)
- Gözlerde aşırı yaşarma (sulanma) veya olağan dışı göz salgıları
- Gözlerde kızarıklık
- Görme netliğinde azalma (zayıf görüş keskinliği)
- Bulanık görme, gökkuşağı veya nesnelerin çevresinde ışık halkası
- Işığa duyarlılık (fotofobi)
- Göz kuruluğu

**Yukarıdakilerden herhangi birini fark ederseniz derhal lenslerinizi çıkarmalısınız.**

Rahatsızlık veya sorun geçerse lense yakından bakınız.

- Lens herhangi bir şekilde hasar görmüşse lensi tekrar gözünüze yerleştirmeyiniz. Lensi saklama kutusuna yerleştiriniz ve göz sağlığı uzmanınıza başvurunuz.
- Lensin üzerinde kir, kirpik veya başka bir yabancı cisim varsa veya sorun ortadan kalkıyorsa ve lens de hasarsız görünüyorsa lensi iyice temizleyip, durulayıp ve dezenfekte edip tekrar takınız.

**Sorun devam ederse lensi derhal çıkarınız ve göz sağlığı uzmanınıza danışınız.**


Yukarıdaki sorunlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız enfeksiyon, kornea ülseri, neovaskülerizasyon veya iritis gibi ciddi bir rahatsızlığınız olabilir. Gözlerinizde ciddi hasarların oluşmasını önlemek için sorunun derhal profesyonel olarak teşhis edilmesini sağlayınız ve hemen tedaviye başlayınız. Gözünüzde bir enfeksiyon olup olmadığını değerlendirmesi için göz sağlığı uzmanınıza giderken, varsa herhangi bir mikroorganizmanın daha iyi tespit edilebilmesi için kültür alınması ihtimaline karşı lenslerinizi, solüsyonlarınızı ve lens kutunuzu da yanınızda götürünüz.

**Basım Tarihi:** 2022-06

İthalatçı: Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş.

Büyükdere Cd. Metrocity İş Merkezi K: 3 Kırgülü Sk. No: 4 Esentepe-Şişli/İstanbul 0212 371 82 00

[www.bausch.com.tr](http://www.bausch.com.tr)

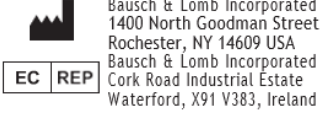

İtalya'da üretilmiştir.  
©/TM Bausch & Lomb Incorporated veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.  
© 2022 Bausch & Lomb Incorporated veya bağlı şirketleri

CE 0050

