

BOSTON® SIMPLUS®
Tek şişede çok işlevli solüsyon

Günlük protein temizliği için protein giderici içerir, kolaylık sağlar ve akşamları lensinizi ovma ihtiyacınızı ortadan kaldırır.

TANIM ve ENDİKASYONLARI:

Boston SIMPLUS®, gaz geçirgen sert kontakt lensler (RGP) için tek şişede; temizleme, dezenfeksiyon ve bakım sağlayan bir yeniliktir. Floro Silikon Akrilat ve Silikon Akrilat gaz geçirgen kontakt lenslerle kullanım onayı almış özel bir formülasyondur. Boston SIMPLUS®; proteini ve lipidi lens yüzeyinden uzaklaştırır ve inatçı depozitleri de yüzeyinden uzak tutar. Lens durulama amaçlı olarak da kullanılabilir ve gevşeyen depozitleri lens yüzeyinden uzaklaştırır. Multi-polimer tampon sistemi lensi göze takmadan önce gerekli hazırlığı yapar ve nemlendirmeyi artırır. Bu formül sayesinde, gözünüzde istenen konfor sağlanır. Zararlı mikroorganizmaları etkili şekilde yok eden, kanıtlanmış bir koruyucu sistem de içermektedir. Temizleme ve dezenfeksiyonda etkili olan bu solüsyon, lens takma anında da göz ile uyumludur.

TALİMATLAR:

1. Mühürlü şişe boyun bandını çıkartın. Şişe boyun bandı açılmışsa veya yoksa kullanmayın.
2. Yumuşak bir sabunla ellerini yıkayın (Dikkat: sıvı sabunlar yağ bazlı süspansiyon ajanları içerebilir.).
3. Lenslerinizi boş lens kabına yerleştirin ve kabı taze Boston SIMPLUS® ile doldurun. Lenslerinizi takmadan önce en az dört saat veya gece boyunca solüsyon içinde tutun.
4. İşlem tamamlandıktan sonra lenslerinizi iki ila dört damla Boston SIMPLUS® ile yirmi saniye avucunuzda ovun.
5. Boston SIMPLUS® ile yaklaşık beş saniye durulama yaptıktan sonra lenslerinizi takın.
6. Her kullanımdan sonra lens kabını ve kapaklarını kaynamış sıcak suyla temizleyin ve kurumaya bırakın.

DİKKAT: Şişe ağzının hiçbir nesneyle temas etmemesine özen gösterin. Kullanılmadığında şişe tam olarak kapalı olmalıdır.

BİLEŞİMİ:

Poloksamin, hidrosialkilfosfonat, borik asit, sodyum borat, sodyum klorid, hidroksipropilmetil selüloz, glukam içeren; klorhekzidin glukonat (%0,03) ve poliaminpropil biguanid (0,005) ile korunan, steril, su bazlı tamponlanmış çözeltilidir.

UYARILAR ve ÖNLEMLER:

- Ürün içeriklerinden birine alerjiniz varsa kullanmayın.
- Yumuşak kontakt lenslerle (hidrofilik) kullanmayın.
- Göz doktorunuzun kullanım talimatlarına uyun. Talimatlara uyulmaması, ciddi göz enfeksiyonlarına neden olabilir.
- Lenslere dokunmadan önce her zaman ellerinizi yıkayın.
- Lens kabında kalan solüsyonu asla tekrar kullanmayın.
- Doktorunuz önermedikçe, solüsyonla beraber başka ilaç kullanmayın.
- Üç ay sonra kalan solüsyonu kullanmayın.
- Lens kabını sıkça değiştirin.


ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI BİR YERDE SAKLANMALIDIR.

ÖNEMLİ:

Gözlerinizde rahatsızlık veya aşırı yaşlanma olursa, görüşünüz azalmışsa, lenslerinizi kullanmayın ve hemen göz doktorunuza başvurun.

Üretici Firma: Bausch & Lomb Incorporated, Rochester NY 14609, USA

İthalatçı firma: Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. Esentepe-Şişli/İSTANBUL

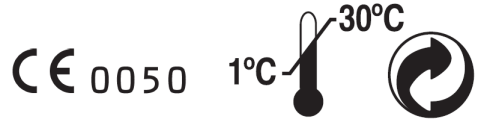

Rev tarihi: Ocak 2013