

Farklı Tasarım, Kolay Kullanım

Multifokal Başarısı Doğru Uygulamayla Başlar!

BAUSCH + LOMB
ULTRA® contact lenses
with ● MoistureSeal® TECHNOLOGY

Ultra performans için aşağıdaki basit adımları izleyin:

1. Adım: Güncel Refraksiyon Değerlerini Belirleyin

- Güncel subjektif refraksiyon ölçümü yapın ve gerekiyorsa sferik eşdeğeri belirleyin.
- Dominant gözü tespit edin.

2. Adım: Başlangıç Kontakt Lens Güçlerini Belirleyin

- Reçete değeri ± 4.00 D'den büyükse, verteks mesafesi düzeltmesini uygulayın.
- Astigmatizma değerinin 1.00 D'den düşük olduğundan emin olun.
- Yakın ek gücü (ADD), hastanın bireysel görme ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. (Masaüstü bilgisayar, tablet, mobil cihaz kullanımı vb.)
- Uygun başlangıç deneme lensini seçmek için **ULTRA® for Presbyopia** uygulama kılavuzu tablosunu referans alın.
- Görme değerlendirmesinden önce hastanın, muayene odası dışında gerçek yaşam koşullarında en az 10 dakika geçirmesini sağlayın.

3. Adım: Gerekli Durumda İlave Düzeltme Yapın

- Hastanın yakın veya uzak görmede hala belirgin bir düzeltme ihtiyacı varsa, **ULTRA® for Presbyopia** uygulama kılavuzu adımları doğrultusunda düzeltme yaparak yeniden değerlendirin.



Yakın veya Uzak Görüşte Düzeltme İhtiyacı Duyan Hastalar için

Adisyon (ADD)	Göz	Başlangıç Lensi Seçimi	Yakın Görüş İyileştirme	Uzak Görüş İyileştirme
+0.75D ila + 1.50D Düşük	Dominant Göz	 Düşük	 Düşük	BAUSCH+LOMB ULTRA® Sferik *Hala memnun değilse dominant göze elle tutulan merceklerle -0.25D ekleyerek değişiklik yapın
	Non-Dominant Göz	 Düşük	 Yüksek *Hala memnun değilse non-dominant göze elle tutulan merceklerle +0.25D ekleyerek değişiklik yapın	 Düşük
+1.75D ila + 2.50D Yüksek	Dominant Göz	 Yüksek	 Yüksek	 Düşük *Hala memnun değilse dominant göze elle tutulan merceklerle -0.25 ekleyerek değişiklik yapın
	Non-Dominant Göz	 Yüksek	Sferik Değere +0.25 ilave  Yüksek *Hala memnun değilse non-dominant göze elle tutulan merceklerle +0.25D ekleyerek değişiklik yapın	 Yüksek

Sadece 2 Adisyon ile
Kullanıcılar;

%80

İlk Uygulamada

%96

İkinci Uygulamada

*lense başarıyla uyum sağlamıştır.**