


ARTELAC SPLASH nasıl kullanılır?

Dikkat! İlk kullanımda veya kullanıma bir süre ara verildikten sonra ürün tekrar kullanıldığında:

Kapağını çıkartınız ve şişeyi baş aşağı çevirerek şişenin ucundan bir damla gelene kadar yaklaşık 20 kez basınız. Artık şişe kullanıma hazırdır.

	1. Bu ürünü kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız ve şişeyi gösterildiği gibi tutunuz.
	2. Her kullanımdan önce koruyucu kapağı çevirerek şişenin ucundan çıkartınız. Solüsyonun kontamine olma ihtimalini engellemek için şişe ucunu parmaklarınızla veya başka bir yüzeye temas ettirmekten kaçınınız.
	3. Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve başınızı hafifçe geriye yaslayınız. Alt gözkapağınızı serbest elinizin bir parmağıyla nazikçe aşağı doğru çekiniz. Şişeyi gözünüzün üzerine getirip dikey pozisyonda tutarak gözünüze bir damla damlatmak için pompa mekanizmasına birlikte basınız. Herhangi bir yaralanmayı önlemek için şişe ucunu gözünüze temas ettirmekten kaçınınız. Damlanın göz yüzeyine en iyi şekilde dağılmasını sağlamak için önce gözlerinizi kapatın, daha sonra yavaşça kırpın.

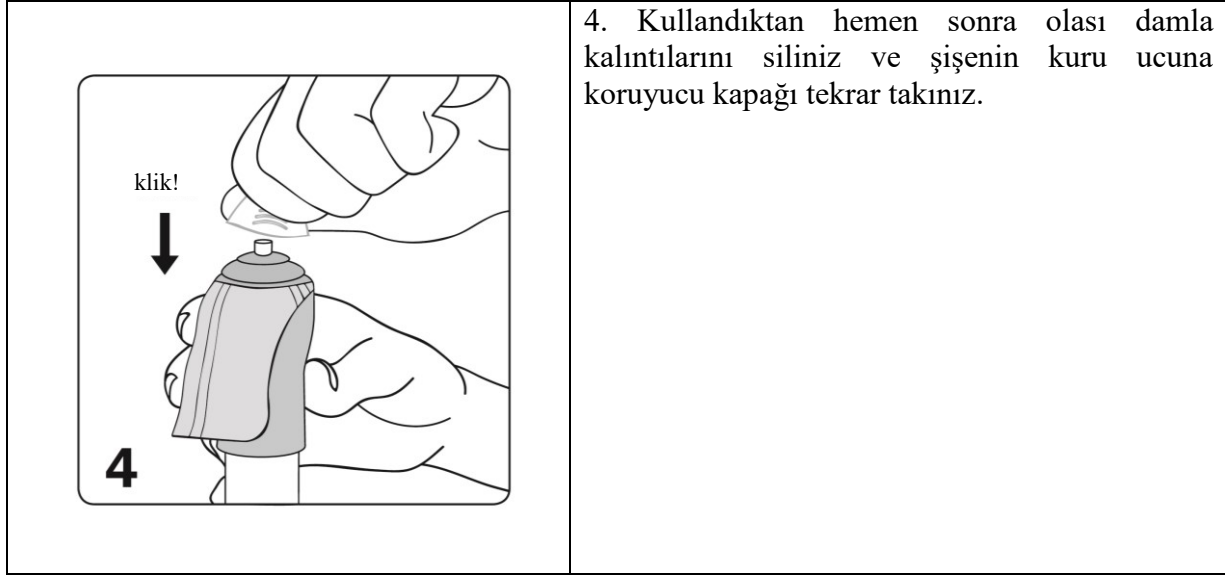

ARTELAC SPLASH'ın bu yenilikçi pompa mekanizması, göz damlası solüsyonunun koruyucu içermemesini ve daha rahat damlatılmasını sağlar. Bildirilen dolun hacmi, şişeden tamamıyla uzaklaştırılabilir. Bu şişe tasarımı sayesinde, şişede çok az solüsyon kalıntısı bulunur.

49661PB764/3-TR/P1TR01