

Lacelle™ Tri-Kolor Renkli Yumuşak Kontakt Lens

Açıklama:

Lacelle™ Tri-Kolor tamponlu salin çözümü içinde günlük değişim gerektiren aykır yumuşak kontakt lens olarak tasarlanmıştır. Bireyler arasında farklılıklar olduğundan, lütfen reçetene ve göz doktorunuzun gün içinde uygun kullanım süresi ve lens değiştirme sıklığı ile ilgili talimatlarına uyun.

Göz doktorunuzun tavsiyelerine uymamak, lenste kalıntıların birikmesi nedeniyle tahrişe veya rahatsızlığa yol açabilir. Lensleri belirtildiği şekilde değiştirmeniz, güvenli bir şekilde görmenizi ve konforlu lenslerin keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu lensler, gözün görünen renginin belirginleştirilmesi veya değiştirilmesinin yanı sıra refraktif ametropinin (miyopi ve hipermetropi) optik olarak düzeltilmesi için kullanılır.

Kullanım Amacı:

Kornea üzerine doğrudan yerleştirilerek görmenin düzeltilmesi için kullanılan tek odaklı lens.

Genel Talimatlar:


Lenslerinizi dokunmadan önce ellerinizi her zaman dikkatlice yıkayın ve bol suyla iyice durulayın. Ellerinizi, hav bırakmayan temiz bir havlu ile kurulayın. Lenslerinizi, lensin düşmesi durumunda görülebilmesini sağlayacak net, temiz bir yüzey üzerinde tutun. Sol lense karışmasını önlemek için, her zaman önce sağ lense başlayın. Lenslerinizi çıkardktan sonra, göz doktorunuzun önerdiği işlemleri yapın. Lens kabızının bakımının da son derece önemli olduğunu unutmayın. Kirlenmesini önlemek için her gün boşaltılmalı, temizlenmeli ve kurutulmalı; ayrıca, düzenli olarak değiştirilmelidir.

Sağ lensin takılması:

1. Lensin ters dönmüş olmadığından emin olun. Lensi sağ işaret parmağınızla yerleştirin ve lensin tamamen temiz olduğundan emin olmanın yanı sıra şekli de kontrol edin. (Şekil 1 ve Şekil 2)
2. Sol elinizin işaret ve ikinci parmağıyla üst göz kapağınızı açık tutun. Aynı anda, sağ elinizin ikinci parmağıyla alt göz kapağınızı tutun ve ayında doğrudan gözünüze bakın. Şimdi, lensi nazikçe gözünüze yerleştirebilirsiniz. (Şekil 3)

Sol lensin takılması:

Yukarıda açıklanan tüm adımları tekrarlayın.

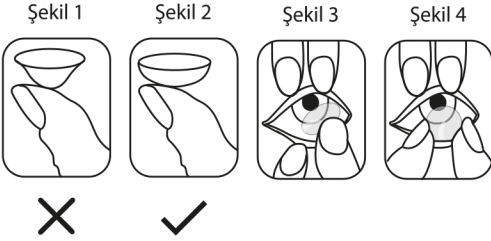

Lensin çıkarılması:

1. Ellerinizi yukarıdaki "Genel Talimatlar" bölümünde açıklandığı gibi yıkayın ve kurulayın.
2. Yukarı bakın ve alt göz kapağınızı hafifçe aşağıya doğru çekerek tutun, sağ lensin alt kısmını sağ işaret parmağınız ve başparmağınızla hafifçe sıkıştırın, bu aşamada lensin tırnaklarınızla temas etmesinden kaçının. Lensi gözünüzden çıkarın. (Şekil 4)
3. Sol lensi çıkarmak için aynı prosedürü sol lens için tekrarlayın.

Dezenfeksiyon:

Lensinizi takmadan önce ve çıkardıktan sonra daima göz doktorunuzun önerdiği kontakt lens çözümünüzü kullanarak durulayın. Genel olarak, Bausch + Lomb Renu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyon gibi çok amaçlı solüsyonlar hidrofilik kontakt lensler için son derece uygundur.

Sert veya gaz geçirgen lensler için üretilmiş solüsyonlar kullanılmamalı ya da ısıyla dezenfeksiyon yapılmamalıdır. Lenslerinizi çıkardıktan ve tavsiye edilen şekilde dezenfekte ettikten sonra, Bausch + Lomb Renu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyon ile doldurulmuş lens kabında saklayın.

Kontrendikasyonlar:

Lütfen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin geçerli olması durumunda lensleri kullanmaktan kaçının: Kuru göz, konjonktivit, inflamasyon, ödem, aşırı duyarlılık. Bu gibi durumlar kaşıntı, tahriş ve tıkanıklığın neden olduğu rahatsızlığa neden olabilir.

Ek öneriler:

Lenslerinize zarar vermemek için, lensleri tırnaklarınızla veya sivri uçlu nesnelere tutmayın. Tırnaklarınızı uzatmayın. Hiçbir zaman musluk suyu, maden suyu veya yumuşak kontakt lensler için önerilmeyen herhangi bir ürün kullanmayın. Saç spreyi veya herhangi bir kozmetik aerosolün lenslerinize temas etmesinden kaçının. Sıkı yüzme gözlükleri kullanmadığınız sürece lenslerinize takılıyken herhangi bir spor yapmayın. Uyumadan önce lenslerinizi mutlaka çıkarın. Makyaj yapmadan önce lenslerinizi takın ve makyajınızı temizlemeden önce lenslerinizi çıkarın. Gözleriniz için herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka göz doktorunuza danışın. Gözlerinizde kızama ve tahriş olursa ya da herhangi bir ağrı hissederseniz, lenslerinizi derhal çıkarın ve göz doktorunuza görünüşün. Göz doktorunuza düzenli aralıklarla ziyaret edin. Ambalajı açılmış veya hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Oda sıcaklığında saklayın. (1–30°C)

	Uluslararası sembollerin açıklaması
	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
	Kullanım kılavuzuna bakın
	AB temsilciliği
	Üretici
	Buhar kullanarak sterilizasyon
	Son kullanma tarihi
	Lot numarası
	Üretim tarihi
	Sıcaklık sınırları



G&G Contact Lens (Beomul-dong), 401, 402, 502, 701, 802, 93, Beoman-ro, Suseong-gu, Daegu, Korea.



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

TM® are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

© Bausch & Lomb Incorporated

İthalatçı:

Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. Metrocity İş Merkezi No:4 Kat:3
34394 Esentepe – Şişli/İstanbul
Telefon: 0 212 371 82 00
E-posta: info@bausch.com.tr
www.bausch.com.tr



1434

Revizyon tarihi: 16.11.2023

GD-B01P4-00-TR